

BIOLITO

Сделано в Германии

Медицинский аппарат для лечения недержания мочи и болей в области малого таза

Для самостоятельного домашнего использования

Контроль • Комфорт • Уверенность — каждый день

♦ В каких ситуациях помогает

BIOLITO

- ▶ Подтекание мочи при кашле, смехе, физической нагрузке.
- ▶ Внезапные, неконтролируемые позывы.
- ▶ Смешанные формы недержания.
- ▶ Боли и дискомфорт в области малого таза.
- ▶ Ослабление мышц после родов, операций, в период менопаузы.

BIOLITO

- Медицинское изделие с CE-сертификацией.
- Встроенные системы безопасности.
- Простое управление и готовые программы.
- Для самостоятельного использования в домашних условиях.

mun. Chişinău, str. Korolenko 9,
str. Toma Ciorba 24

079 310 030, 079 310 040, 079 454 504



Как работает Biolito

Biolito использует мягкую электрическую стимуляцию, аналогичную естественным сигналам организма.

- 1 Активирует мышцы тазового дна
- 2 Укрепляет и тренирует их
- 3 Помогает восстановить контроль над мочеиспусканием
- 4 Снижает болевые ощущения

Ощущения — лёгкие и комфортные, без боли.

Что меняется в жизни женщины?

- Уверенность вне дома
- Свобода движения и активности
- Меньше стресса в повседневной жизни
- Улучшение интимного комфорта

Программы работы Biolito

Biolito разработан для самостоятельного использования пациентами, без какой-либо посторонней помощи. Аппарат имеет **6 предустановленных программ**, что облегчает выбор в зависимости от имеющейся проблемы.

Программы 1, 3, 4: стрессовое недержание мочи (обычно возникает при напряжении — кашле, смехе, чихании, натуживании, беге, подъёме тяжестей и т. д.)

Программа 2: urgentное недержание мочи (ощущение резких, императивных позывов к мочеиспусканию, сопровождающихся непроизвольной потерей мочи)

Программа 5: уменьшение и/или устранение болей в области малого таза.

Программа 6: смешанное недержание мочи (стрессовое и urgentное)

Примечание! Для устранения **недержания кала** используются программы 3 и 4.




Вагинальный зонд

Ректальный зонд

Как устанавливаются электроды?

Biolito применяется двумя способами, в зависимости от ситуации:

- 1 С помощью вагинальной или ректальной насадки
 - Аккуратно вводится.
 - Обеспечивает точное воздействие на мышцы тазового дна.
 - Используется с медицинским гелем.
 - Подходит для регулярной домашней терапии.

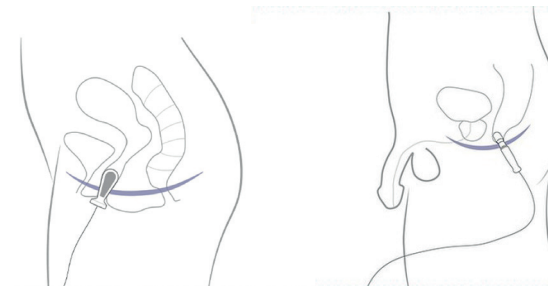


Вагинальный зонд

Ректальный зонд

- 2 С помощью самоклеящихся электродов на кожу

- Размещаются в области внутренней лодыжки, по ходу N.Tibialis.
- Крепятся на чистую и сухую кожу.
- Не требуются введения насадок.

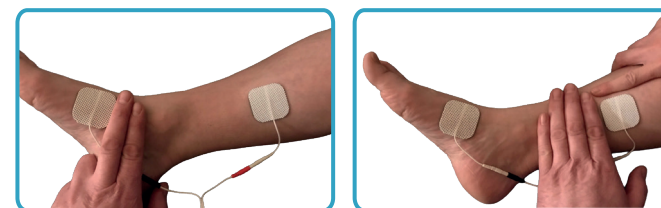

ВАЖНО

Biolito — медицинский прибор. Используется без лекарств, не вызывает привыкания и предназначен для регулярной терапии в домашних условиях.

Перед применением прочитайте внимательно инструкцию.

Сделано в Германии

BIOLITO

 Fabricat in
Germania

Dispozitiv medical pentru tratamentul incontinenței urinare și al durerilor pelvine

Pentru utilizare personală, la domiciliu

Control • Confort • Încredere - în fiecare zi

◆ Când este recomandat **BIOLITO**

- ▶ Pierderi involuntare de urină la efort, tuse sau râs.
- ▶ Nevoia bruscă de urinare.
- ▶ Incontinență mixtă.
- ▶ Dureri și disconfort în zona pelvină.
- ▶ Slăbirea mușchilor după naștere, operații sau menopauză.

BIOLITO

- Dispozitiv medical certificat CE.
- Sisteme de siguranță integrate.
- Utilizare simplă, fără supraveghere permanentă.
- Destinat uzului independent la domiciliu.

mun. Chișinău, str. Korolenko 9,
str. Toma Ciorba 24

☎ 079 310 030, 079 310 040, 079 454 504



Cum funcționează Biolito

Biolito transmite impulsuri electrice blânde, similare semnalelor naturale ale corpului.

- 1 Stimulează mușchii planșeului pelvin.
- 2 Îmbunătățește tonusul muscular.
- 3 Ajută la recâștigarea controlului urinar.
- 4 Contribuie la reducerea durerii.

Senzatiile sunt usoare și bine tolerate.

Ce se schimbă în viața ta?

- Mai multă siguranță în afara casei.
- Libertate de mișcare și activitate.
- Mai puțin stres zilnic.
- Îmbunătățirea confortului intim.

Programe de funcționare Biolito

Biolito a fost conceput pentru a fi utilizat de pacienți, fără niciun ajutor extern. Aparatul are 6 programe presetate, ușurând alegerea în dependentă de problemă.

Programele 1,3,4: incontinența urinară de stres (apare de obicei la încordare – tuse, râs, strănut, scameț, alergare, ridicare greutate etc).

Programul 2: incontinența urinară de urgență (senzație de nevoie urgentă de a urina, însoțită de pierderi involuntare de urină).

Programul 5: ameliorarea și/sau eliminarea durerilor pelvine.

Programul 6: incontinență urinară mixtă (de stres și de urgență).

*Nota! Cu scop de eliminare a **incontinenței fecale** se folosesc programele 3 și 4.*



Sondă vaginală




Sondă rectală

Cum se aplică electrozii?


Biolito poate fi utilizat în două moduri, în funcție de recomandare:

1 Cu sondă vaginală sau rectală

- Sonda se introduce delicat.
- Permite stimularea precisă a mușchilor planșeului pelvin.
- Se utilizează cu gel medical.
- Potrivită pentru terapie regulată la domiciliu.

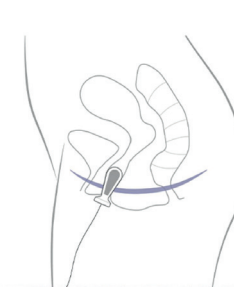


Sondă vaginală

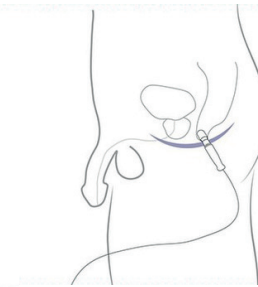

Sondă rectală

2 Cu electrozi autoadezivi aplicați pe piele

- Electrozii se aplică în zona maleolei interne, pe traiectul nervului tibial.
- Se fixează pe pielea curată și uscată.
- Nu implică utilizarea sondelor.

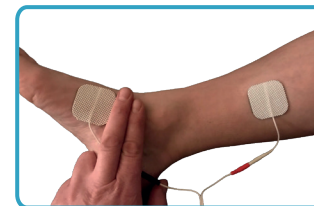

IMPORTANT

Biolito este un dispozitiv medical. Nu conține medicamente, nu creează dependență și este destinat utilizării regulate la domiciliu.

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunea.

 Fabricat in
Germania